

Lentilles de contact
rigides

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

i-NIGHT

À porter la nuit pour voir le jour :
sans lunettes et sans lentilles.



L'orthokératologie
au plus haut niveau



passt.

À porter la nuit
pour voir le jour.



Sans lunettes et sans lentilles.

Vous portez des lentilles de contact pendant la journée – pour améliorer votre vision.
Vous portez des lentilles de nuit pendant la nuit – pour améliorer votre vision pendant la journée.


Paupières fermées, les lentilles i-NIGHT se sentent à peine. Elles peuvent par conséquent être aussi utilisées en cas d'intolérance aux lentilles de contact. Les lentilles de nuit veillent à ce que la courbure de la cornée soit doucement remodelée au cours du sommeil.

Avec ce processus, la myopie diminue ou est corrigée. C'est un facteur décisif, surtout dans le cas d'enfants souffrant d'une myopie progressive. Grâce aux lentilles i-NIGHT, que cela soit en faisant du sport ou au travail, les contraintes causées par les lentilles et les lunettes appartiennent au passé. Le quotidien gagne ainsi définitivement en insouciance. Les lentilles ou les lunettes supplémentaires deviennent superflues, ce qui se ressent positivement sur les coûts.

Les avantages :

- Bonne alternative à la correction chirurgicale de la myopie.
 - Pas d'irritation des yeux, ni de poussière sous les lentilles.
 - Pas de problème en cas de rhume des foins, ni de sensation de corps étranger.
 - Est déjà à l'œuvre dès 6 heures de sommeil, tient toute la journée.
 - Pertinence écologique : des lentilles de contact annuelles permettent d'économiser des emballages.
 - Le procédé est réversible.
 - Lentilles également très bien adaptées aux enfants : ils ne laissent pas traîner leurs lunettes, ni ne perdent leurs lentilles de contact.
-


Pendant la journée
acuité visuelle complète sans lentilles

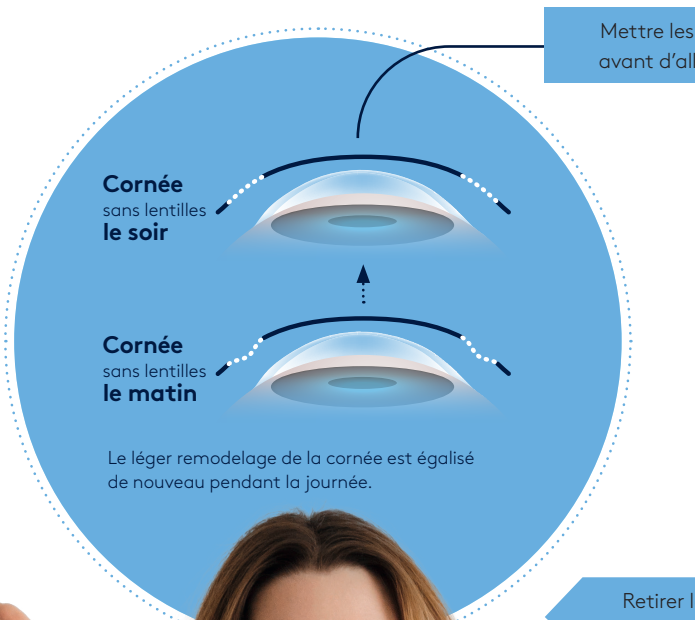

La nuit

Vous allez au lit avec vos lentilles

lentilles
er au lit

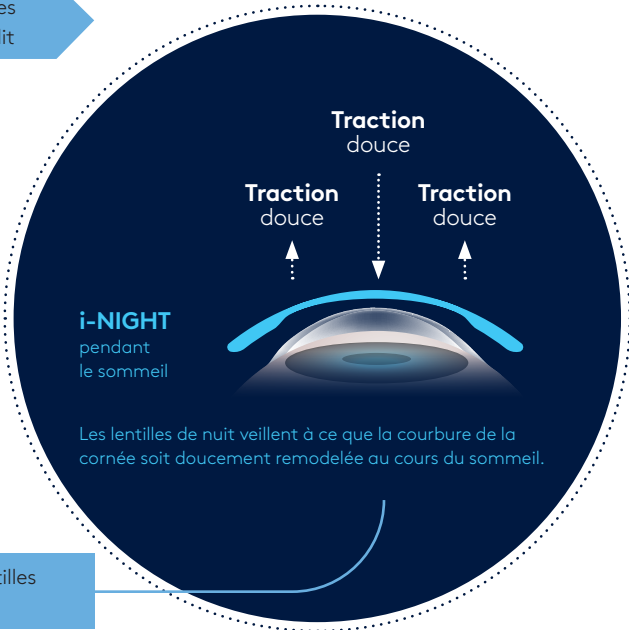

es lentilles
lever



Les questions les plus fréquentes

Pourquoi des lentilles de contact ?

Afin que vous puissiez mieux voir. Non – afin que votre vision soit parfaite. Pas seulement concernant la netteté de votre vue, mais aussi sans aucune limitation. Une paire de lunettes peut être seyante. Mais aucun modèle ne peut défier les lentilles de contact. En effet, celles-ci vous prodiguent de la liberté – une liberté totale. Car aucune monture, aucune branche ni aucun verre de lunettes ne viennent restreindre votre champ de vision. Et parce que vous pouvez porter des lentilles de contact au travail, durant vos loisirs et en faisant du sport. Sans aucune restriction.

Pourquoi de lentilles de contact sur mesure ?

Avec les lentilles de contact, des mesures imperceptibles à l'œil nu s'avèrent pourtant décisives. Autre différence essentielle : avec les lentilles journalières et mensuelles, l'œil doit s'adapter à la lentille. Or, dans le cas des lentilles sur mesure, c'est l'inverse : ce sont elles qui s'adaptent à votre œil.

Pourquoi des lentilles de nuit (lentilles ortho-k) ?

La lentille de nuit ne sèche pas du tout l'œil et vous ne les sentez pas en dormant. Il est par ailleurs très improbable de perdre une lentille la nuit.

Pourquoi des lentilles de contact sur mesure provenant d'opticiens ou d'ophtalmologistes ?

Pour de bonnes raisons : votre opticien ou votre ophtalmologiste est spécialisé dans les lentilles de contact. Il a suivi les formations nécessaires. C'est pourquoi il sait exactement quel type de lentilles de contact est adapté à vous et à vos yeux. Et il possède l'expérience et la patience nécessaires pour les ajuster exactement à vos yeux.

Maniement et entretien des lentilles ortho-k

Afin d'éviter des complications, comme par exemple des irritations ou des infections oculaires, les lentilles ortho-k doivent être employées et entretenues avec précaution.

- Positionnez la lentille sur votre index.
- Remplissez la lentille avec quelques gouttes de solution saline.
- Placez-la prudemment sur le milieu de votre œil, puis clignez de l'œil en douceur et sans pression.

Préparation pour le port des lentilles ortho-k

La propreté constitue la première étape, et la plus importante : avant de toucher les lentilles, vos mains doivent être parfaitement propres. Utilisez des lingettes jetables afin qu'aucun germe et qu'aucune bactérie ne se retrouve sur les lentilles. Évitez les savons et les lotions à base de crème ou les cosmétiques conçus à partir d'huile. Commencez toujours par la même lentille afin d'éviter les confusions.

Retirer la lentille ortho-k

Si la lentille est fixée à l'œil le matin :

- Mettez 2 à 3 gouttes de solution saline dans l'œil.
- Attendez que la lentille bouge librement lorsque vous clignez de l'œil.
- Vous pouvez alors retirer celle-ci.

Mettre la lentille ortho-k

Suivez les étapes ci-dessous pour mettre la lentille sur l'œil :

- Rincez la lentille avec la solution saline.

Nettoyer et conserver la lentille ortho-k

- Nettoyer la lentille environ 20 secondes avec le produit nettoyant d'Appenzeller Kontaktlinsen.
- Rincez-la ensuite avec soin à l'aide de la solution saline de notre gamme de produits.
- Désinfectez et neutralisez la lentille avec le système de peroxyde d'Appenzeller Kontaktlinsen. Les petites corbeilles du système de peroxydes sont idéales pour conserver vos lentilles ortho-k.



passt.

Toutes les informations :
www.i-night.ch

Suisse

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Hauptstrasse 22
CH-9042 Speicher AR
Téléphone 071 344 20 00

Allemagne

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Kemptener Strasse 8
D-88131 Lindau
Téléphone 0800 9042 9042 (gratuit)

Autriche

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Postfach 29
A-6973 Höchst
Téléphone 0800 9042 9042 (gratuit)

www.appenzeller-kontaktlinsen.ch

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch



Lentilles de contact
rigides

i-NIGHT

© Appenzeller Kontaktlinsen AG | Subject to change | 2022-05
All trademarks are the property of Appenzeller Kontaktlinsen.
® En tant qu'entreprises, nous nous soucions de la nature
et disposons d'une licence d'emballage du Point vert.